

ROSA – Klein (Pädiatrie) PRH028PI01A



- Das rosa Modell wird an den unteren und oberen Extremitäten bei Säuglingen und Kindern eingesetzt.

Vorteile:

- Ein schmaler Querschnitt ermöglicht ein größeres chirurgisches Feld, daß mit den traditionellen Manschetten unmöglich wäre.

Dieses Modell kann in folgenden Verfahren eingesetzt werden:

- Orthopädische Kinderchirurgie
- Deformitätenkorrektur
- Gliedmaßenverlängerung Manchmal wird es bei mageren Erwachsenen eingesetzt.
- Manchmal wird die Staubinde für magere Erwachsene eingesetzt.



Tipp: Gebrauchen sie bitte die Staubinde nicht an den Extremitäten länger als 70 cm.

GELB - Medium (Arm) PRH040YE01A



- Das gelbe Modell wird an den oberen Extremitäten eingesetzt.

Vorteile:

- Die Staubinde kann näher zu dem chirurgischen Feld an dem Unterarm eingesetzt werden und ischämische Gewebeschäden reduzieren.
- Größeres chirurgisches Feld in Traumachirurgieverfahren oberhalb des Ellenbogens.


Dieses Modell kann in folgenden Verfahren eingesetzt werden:

- Hand- und Handgelenkchirurgie (z.B., Abzugsfinger, Karpaltunnelsyndrom)
- Handgelenkfrakturen
- Handfrakturen
- Ellenbogenfrakturen
- Humerusfrakturen, Radius- und Ulnafrakturen
- Freier Gewebettransfer (plastische Chirurgie)
- Manchmal diese Staubinde wird an den Oberschenkel bei Kindern eingesetzt.



Tipp: Für den Einsatz gebrauchten Sie bitte mediale-laterale (M-L) Anlagenpositionierung.

ORANGE – Groß (Bein) PRH060OR01A

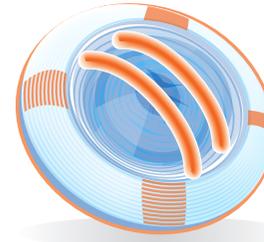

- Das orange Modell wird an den unteren Extremitäten und auch oberen Extremitäten bei adipöser Patienten eingesetzt.

Vorteile:

- Die Staubinde ermöglicht hervorragende Blutentleerung der unteren Extremitäten, dabei hat man ein reines, größeres und steriles chirurgisches Feld.

Dieses Modell kann in folgenden Verfahren eingesetzt werden:

- Fuß und Sprunggelenk (z.B. Ballen)
- Knie (z.B. ACL, TKA)
- Trauma der unteren Extremitäten
- Freier Gewebettransfer (plastische Chirurgie)



Tipp: Für den Einsatz gebrauchten Sie bitte anterior/posteriore (A-P) Anlagenpositionierung.

SCHWARZ & WEIß – Extra-groß (BEIN) PRH090BW01A



- Das schwarze & weiße Modell wird auch an den unteren Extremitäten eingesetzt.

Vorteile:

- Die Staubinde ist besonders für adipöse Patienten und ihre konische Gliedmaßen geeignet.

Dieses Modell kann in folgenden Verfahren eingesetzt werden:

- Fuß und Sprunggelenk (z.B. Ballen)
- Knie (z.B. ACL, TKA)
- Trauma der unteren Extremitäten
- Freier Gewebettransfer (plastische Chirurgie)



Tipp: Dieses Modell hat vier Haltebänder und man braucht zwei Menschen, um es einzusetzen.